


1	NOMBRE DEL PRODUCTO	PROTECTOR CUTÁNEO JAMUC®
2	COMPOSICIÓN :	Glycerin (and) polyester-5, Glycerin, Acetyl Tributyl Citrate, Water (and) Acrylates Copolymer, PPG-5-Ceteth-20, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Fragancia lavanda Galesa, Agua desmineralizada.
3	DESCRIPCIÓN	El Protector Cutáneo JAMUC forma una barrera protectora entre al piel del paciente y el adhesivo. <ul style="list-style-type: none"> • Barrera protectora que preserva la integridad de la piel. • Permite transpiración de la piel manteniéndola seca. • Seguro y confiable en pieles sensibles: ayuda a prevenir la dermatitis por contacto y hace que la remoción del adhesivo sea menos dolorosa para los pacientes (pediátricos, geriátricos, ostomizados, oncológicos, etc). • Presentacion sachet individual, empaque seguro, sencillo de aplicar. • Fácil de remover, no requiere fricción para su remoción. • Previene eventos adversos relacionados con lesiones en piel por retiros de adhesivos o alergia a estos.
4	ESTABILIDAD	Apariencia: Toallita de tela no tejida y húmeda, con olor característico, forma rectangular en dobleces y limpia a simple vista impregnado con Líquido no translúcido, de color blanco lechoso. Valor pH : 5,5 -6,8 Olor: Característico Gravedad específica (20°C): 1,10-1,20
5	INDICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de la piel circundante antes de colocar cualquier tipo de adhesivo de fijación en: sondas, drenes, apósitos, tubos endotraqueales y de torax, dispositivos para estomas, catéteres intravasculares, etc. • Antes de colocar electrodos de monitoreo, en la piel que va a tener contacto con el adhesivo (dejando libre el espacio central donde se coloca la estructura metálica del electrodo). • Proteje la piel alrededor de la herida de agresiones de adhesivos y exudados. • Mejorar adhesión de películas transparentes.
6	INSTRUCCIONES DE USO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpiar y secar muy bien la piel, en el caso de venopunción cumplir con la técnica de asepsia según protocolos institucionales 2. Destapar el sachet de JAMUC® Protector cutáneo, tomar 3. la toalla y frotarla sobre la piel limpia y seca (libre de suciedad, cremas o sustancias oleosas) 4. Dejar secar de 30 a 40 segundos aproximadamente 5. Proceder a ubicar el adhesivo o el apósito sobre la película que ha dejado con el JAMUC® PROTECTOR CUTANEO
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	Uso externo únicamente. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evite contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, lave los ojos con abundante agua. No aplicar directamente en heridas abiertas. En caso de enrojecimiento u otro tipo de signo de irritación suspenda el uso.
8	CONTRAINDICACIONES	Reacción algunos de los componentes
9	DATOS DE SEGURIDAD	<p>Incompatibilidades: No es probable que material específico o grupo de materiales reaccionen con el producto para producir una situación peligrosa.</p> <p>Vida útil- estabilidad (física-Química): No aplica</p> <p>Mantenga alejado del calor, chispas, flama abierta y fuentes de calor.</p> <p>Tratamiento del Residuo: Absorber en vermiculita, arena seca o tierra y colocar en recipientes. Limpiar cuidadosamente la superficie para eliminar la contaminación residual. Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales. Incinere en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. Como alternativa para desecharlo, recurra a instalaciones autorizadas para desechar desperdicios.</p>
10	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2018DM-0019100
11	CONDICIONES DE VENTA	Venta libre al público



V04
ME-FT-62

REFERENCIA	TAMAÑO DEL SACHET	TAMAÑO DE LA TELA	UNIDAD DE EMPAQUE
23051	6X5 cm	12x7 cm	PLEGADIZA X 100 UNIDADES

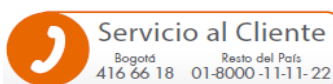

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 y 18-

Parque Empresarial Normandía

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia