

1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	Venda de Malla Tubular
2	COMPOSICIÓN:	La Venda de malla tubular Le Roy, esta elaborada con 70% nylon y 30% hule látex.
3	DESCRIPCIÓN:	Malla elástica de forma tubular, de color blanco con un tejido en forma de triángulos con nudos en los sitios de incidencia de los hilos con propiedades elásticas, Se adapta a cualquier parte del cuerpo.
4	CARACTERÍSTICAS	Se adapta a todas las partes del cuerpo: mano, muñeca, antebrazo, tronco y abdomen, tejido altamente expandible que sostiene apósitos abultados y grandes, se sujeta bien a la piel sin necesidad de adhesivos, mantiene la funcionalidad del área donde es colocada, permite recortarse de acuerdo a las necesidades, material suave y confortable, hipoalergénico.
5	INDICACIÓN	La Venda de malla tubular Le Roy, diseñada para la sujeción de apósitos y tratamientos no compresivos.
6	INSTRUCCIONES DE USO	Abra caja de empaque, desenrolle la malla y recorte el tamaño que necesitan teniendo en cuenta la longitud y el diámetro de la zona corporal donde se usará. Deje un margen en cada extremo de 4cm para doblar sobre si mismo, introduzca sus manos en Venda Malla tubular para poder colocarla en la zona sobre el apósito a sostener, fjela bien con el fin de no dejar arrugas, doble los bordes hacia adentro.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	*Uso externo *Manténgase fuera del alcance de los niños. *Consérvese en lugar seco y fresco *No se exponga a los rayos del sol *Material de curación NO estéril
8	CONTRAINDICACIONES	verificar contraindicaciones a los componentes del producto en la piel del paciente.
9	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2020DM-0022531
10	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
11	FABRICADO POR	LABORATORIOS LE ROY, S.A EN C.V. CON DOMICILIO EN MEXICO
12	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SAS. PROASEPSIS SAS. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
13	CONDICIONES DE VENTA	Riesgo I



Dedo	1
Mano	1-2
Pie	2
Codo	2
Brazo	2-3
Rodilla	3
Pierna	3
Hombro	4
Cabeza	4-5
Región Glútea y Pelvis	5-6
Muslo y Cadera	5-6
Axila	5-6
Tórax-espalda	6

REF. FABRICA	DESCRIPCIÓN EL METRAJE ESTA DADA CON LA MALLA ESTIRADA
13701	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 1 X 2m
13702	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 2 X 2m
13703	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 3 X 2m
13704	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 4 X 2m
13705	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 5 X 2m
13706	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 6 X 2m
13711	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 3 X 20m
13712	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 4 X 20m
13713	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 5 X 20m
13714	VENDA DE MALLA TUBULAR CALIBRE 6 X 20m

V.00

ME-FT-121



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 Y 18

Parque Empresarial Normandia

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia