

1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	VENA VEND. V. - VENDA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC CON O SIN CALAMINA
2	COMPOSICIÓN:	Venda con Óxido de Zinc. Venda con Óxido de Zinc con calamina
3	DESCRIPCIÓN:	Venda extensible impregnada con Oxido de Zinc en un rollo de venda de algodón 100% de tejido plano, saturado con una pasta de Oxido de Zinc con y sin Calamina . Sin Calamina 100 gr de Pasta = 27 gr Óxido de Zinc y 73 gr Vehículo Con Calamina 100 gr= 2 gr Calamina + 26.5 de Óxido de Zinc y 71.5 gr Vehículo
4	CARACTERÍSTICAS	No se deshilacha, No se endurece, No contiene conservadores, genera elastocompresión.
5	INDICACIÓN	Tratamiento ambulatorio de piernas con úlceras. Estasis venosas. Edema linfático. Tromboflebitis. Eczema de las piernas.
6	INSTRUCCIONES DE USO	1. Valorar y limpiar la herida 2. Colocar al paciente con la pierna elevada y con ángulo recto, colocar venda desde la base de los dedos del pie, sin ejercer presión, sobreponiendo sobre cada giro un 50% de la venda, sin arrugas o pliegues hasta la rodilla. 3. Complemente la curación con venda adhesiva o elástica para generar sostenibilidad.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	*En caso de presentar reacción alérgica a alguno de sus componentes suspenda su uso y consulte su medico *Uso externo *Manténgase fuera del alcance de los niños. *Consérvese en lugar seco y fresco *Almacene en lugar protegido del sol *Material de curación NO estéril *Producto desechable *Requiere prescripción médica
8	CONTRAINDICACIONES	*Hipersensibilidad al oxido de zinc y / o Calamina *No colocar en úlceras arteriales o mixtas
9	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2020DM-0022476
10	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
11	FABRICADO POR	LABORATORIOS LE ROY, S.A EN C.V. CON DOMICILIO EN MEXICO
12	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SAS. PROASEPSIS SAS. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
13	CONDICIONES DE VENTA	Riesgo IIA



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
10758	Venda VENA VEND de 7,6 cm x 9,1m (3" x 10 yds) con oxido de zinc	Unidad
10759	Venda VENA VEND de 10,2 cm x 9,1m (4" x 10 yds) con oxido de zinc	Unidad
10760	Venda VENA VEND con Calamina y oxido de zinc de 7,6 cm x 9,1m (3" x 10 yds)	Unidad
10761	Venda VENA VEND con Calamina y oxido de zinc de 10,2 cm x 9,1m (4" x 10 yds)	Unidad

ME-FT-123 V.00

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S
Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 Y 18
Parque Empresarial Normandia
E-mail: proasepsis@proasepsis.com
Bogotá D.C., Colombia